



Дом здравља Горњи Милановац

Дом здравља Горњи Милановац

Примљено:	10.01.2018	
Орг. јед.	Број	Прилог
	7175/49	

МБ: 17776037
ПИБ: 106106068

ПРОЦЕДУРА ПРАЊА И ЧИШЋЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ

— Дом здравља Горњи Милановац —

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
4.18	29.12.2017	
Израдио Др Аксентије Тошић	Контролисао	
Тим за заштиту животне средине	Др <i>Владимир Миловановић</i> Владимир Миловановић спец. педијатрије II 17004365	



1. ПРЕДМЕТ

Овом процедуром утврђује се редослед и садржај поступака приликом прања и чишћења медицинских средстава за стерилизацију.

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура је намењена запосленима у организационим јединицама ДЗ Горњи Милановац које ради пружања здравствених услуга користе медицинска средства која се стерилишу.

3. ДЕФИНИЦИЈЕ

- Дефиниција процедуре: процедура дефинише прање и чишћење материјала за стерилизацију.
- Дефиниција услуге: прањем и чишћењем инструмената и прибора се после њихове употребе истовремено смањује број микроорганизама и спречава сасушивање органског материјала на инструментима и прибору, чиме се смањује ризик од инфекција при руковању и омогућује сигурна стерилизација.
- Дефиниција корисника: особље ДЗ које учествује у припреми материјала за стерилизацију.



4. ОДГОВОРНОСТ

- За контролу: главне сестре ОЈ и чланови Тима за стерилизацију;
- За придржавање процедуре: здравствени радник који припрема материјал за стерилизацију.

5. ОПИС ПОСТУПКА

- Употребљена стерилна медицинска средства од стране произвођача намењена за једнократну употребу не смеју се поново користити већ се са њима поступа као са медицинским отпадом;
- коришћење личне заштитне опреме је обавезно (одећа, рукавице, водоотпорна кецеља, заштитне наочари и друго);
- прање и чишћење материјала врши особље задужено за ове послове;
- особље које ради на овим пословима води рачуна да у току рада нема контакт са стерилном страном / материјалом;
- инструменти се одмах после употребе деконтаминирају потпуним потапањем у раствор средства са детерџентским и дезинфекционим својствима;
- раствор се користи по упутству произвођача у погледу јачине раствора и контактеног времена;
- прање - чишћење материјала врши се у радним просторијама служби после деконтаминације, или у наменском простору, на делу радне површине која је функционално опредељена за то, односно на тачећем месту;
- по потреби сложене инструменте расклопити ради темељног прања; инструменте механички очистити од сваког загађења (ткиво, крв, гној и сл); по потреби користити наменске четке, четкати испод површине течности да се избегне прскање; добро испрати текућом водом а затим осушити чистом компресом и додатно излагањем ваздуху;
- подаци о извршеним радњама уносе се у одговарајућу евиденцију;

6. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ

- извештај о извршеној стерилизацији