



ПРОЦЕДУРА ЗА ПАКОВАЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ

– Дом здравља Горњи Милановац –

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
4.19	29.12.2017.	
Израдио Др Аксентије Тошић	Контролисао	
Тим за заштиту животне средине	Др Ускрш Владимир Миловановић спец. педијатрије II 17004365	



1. ПРЕДМЕТ

Овом процедуром утврђује се редослед и садржај поступака приликом паковања медицинских средстава за стерилизацију.

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура је намењена запосленима у организационим јединицама ДЗ Горњи Милановац које ради пружања здравствених услуга користе медицинска средства која се стерилишу.

3. ДЕФИНИЦИЈЕ

- Дефиниција процедуре: процедура дефинише паковање медицинских средстава за стерилизацију.
- Дефиниција услуге: правилно паковање медицинских средстава за стерилизацију омогућује успешну стерилизацију, и продужено очување стерилности.
- Дефиниција корисника: особље ДЗ које учествује у припреми медицинских средстава за стерилизацију.

4. ОДГОВОРНОСТ

- За контролу: главне сестре ОЈ и чланови Тима за стерилизацију;
- За придржавање процедуре: здравствени радник који пакује медицинска средства за стерилизацију.

5. ОПИС ПОСТУПКА

- Употребљена стерилна медицинска средства од стране произвођача намењена за једнократну употребу не смеју се поново користити већ се са њима поступа као са медицинским отпадом;
- коришћење личне заштитне опреме је обавезно (радна одећа, капа за косу), као и висок степен хигијене руку;
- паковање материјала врши особље задужено за ове послове;
- особље које ради на паковању материјала води рачуна да у току рада нема контакт са нечистим ни са стерилним материјалом;
- паковање материјала врши се у радним просторијама служби, на делу радне површине која је функционално опредељена за то или у посебном простору;
- паковање текстилних предмета и инструмената врши се одвојено, на одвојеним површинама или у посебним терминима за паковање;
- паковање материјала врши се у добоше, касете, у наменску фолију за стерилизацију и сл;
- паковање материјала треба да омогући добро продирање стерилишућег медија у материјал (растресито паковање, инструменти у отвореном положају унутар паковања и слично);



- паковање материјала обухвата и постављање хемијског индикатора са спољне стране и означавање паковања са следећим подацима (дописивањем на фластеру или индикаторској траци): назив службе, датум, садржај паковања;
- подаци о паковању материјала евидентирају се у случају предаје материјала на парну стерилизацију другој служби;

6. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ

- извештај о извршеној стерилизацији
- евиденција пријема материјала на стерилизацију