



Пријављено:	10.01.2018.	
Опис заб.	Број	Прилог
	7175/52	

ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

– Дом здравља Горњи Милановац –

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
4.21	29.12.2017.	
Израдио Др Аксентије Тошић	Контролисао	
Тим за заштиту животне средине	Др Усковић Милош Владимир Миловановић спец. педијатрије II 17004365	



1. ПРЕДМЕТ

Овом процедуром утврђује се редослед и садржај поступака приликом контроле стерилизације медицинских средстава.

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура је намењена запосленима у организационим јединицама ДЗ Горњи Милановац које врше стерилизацију.

3. ДЕФИНИЦИЈЕ

- Дефиниција процедуре: контрола стерилизације медицинских средстава је поступак којим се употребом индикатора прати и доказује ефикасност рада стерилизатора, односно стерилност материјала.
- Дефиниција услуге: контрола стерилизације врши се применом / постављањем одговарајућих индикатора у / на материјал који се стерилише.
- Дефиниција корисника: особље ДЗ које врши стерилизацију.

4. ОДГОВОРНОСТ

- За контролу: главне сестре ОЈ и чланови Тима за стерилизацију;
- За придржавање процедуре: здравствени радник који врши стерилизацију;

5. ОПИС ПОСТУПКА

- контрола процеса **суве стерилизације** врши се:
 - хемијским индикатором за суву стерилизацију, у сваком циклусу стерилизације; комад траке хемијског индикатора лепи се на свако паковање, са спољне стране; ово омогућује разликовање стерилисаних од нестерилисаних паковања; при правилном циклусу беле пруге на траци мењају боју у тамнозелену; по успешно завршеном циклусу стерилизације комад траке хемијског индикатора исећи са стерилисаног паковања (део оставити на паковању) и залепити у извештај о извршеној стерилизацији, односно у свеску стерилизације;
 - биолошком контролом; врши се ради потврде гермицидног ефекта; користи се тест-трака са спорама *B. subtilis*; најмање једна тест-трака индикатора се поставља у стерилизатор са материјалом који се стерилише; биолошка контрола се врши два пута годишње преко Института за јавно здравље Краљево;
- уколико неки индикатор контроле стерилизације покаже неуспешност стерилизације стерилисана средства се не сматрају стерилним; стерилизацију треба поновити са новим индикаторима; у случају поновљене неуспешне стерилизације лице у служби задужено за стерилизацију стерилизатор ставља ван употребе, то видно означава на стерилизатору и обавештава главну / одговорну сестру, Техничку службу и координатора Тима за стерилизацију

6. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ

- извештај о извршеној стерилизацији
- свеска суве стерилизације