



Пријављено:	10.01.2018	
Бр. јед.	Број	Прилог
	1175	57

ПРОЦЕДУРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И БЕЗБЕДНО РУКОВАЊЕ СТЕРИЛИЗАТОРИМА

– Дом здравља Горњи Милановац –

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
4.26	29.12.2017.	
Израдио Др Аксентије Тошић	Контролисао	
Тим за заштиту животне средине	Др <i>Владимир Миловановић</i> Центар Медицине Владимир Миловановић спец. педијатрије II 17004365	



1. ПРЕДМЕТ

Овом процедуром утврђује се редослед и садржај поступака ради безбедног руковања стерилизаторима.

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура је намењена запосленима на стерилизацији медицинских средстава.

3. ДЕФИНИЦИЈЕ

- Дефиниција процедуре: процедура дефинише коришћење и безбедно руковање стерилизаторима.
- Дефиниција услуге: безбедно коришћење и руковање стерилизаторима обезбеђује сигурност радника и поузданост стерилизације.
- Дефиниција корисника: здравствени радници који раде са стерилизаторима.

4. ОДГОВОРНОСТ

- За контролу: главне сестре ОЈ и чланови Тима за стерилизацију;
- За придржавање процедуре: здравствени радници који раде са стерилизаторима.

5. ОПИС ПОСТУПКА

- У Дому здравља Горњи Милановац стерилизација се врши у сувим стерилизаторима;
- Приступ и рад са стерилизатором је ограничен и дозвољен само особљу задуженом за стерилизацију;
- Увек користити атестиран и технички исправан уређај;
- Са уређајем увек руковати сувим рукама;
- Пре сваке употребе стерилизатора визуелно проверити стање термостата, термометра, да ли се врата добро затварају, електрични прикључак;
- Стерилизатор се користи у складу са упутствима произвођача стерилизатора;
- Упутства за коришћење се истичу на или у близини стерилизатора;
- У току рада стерилизатора врши се надзор – обиласци стерилизатора и врши провера задатих параметара стерилизације, тј контролишу мерни инструменти;
- По завршетку циклуса стерилизације врата не отварају док се уређај не охлади;
- Код одступања од уобичајеног режима рада лице у служби задужено за стерилизацију стерилизатор ставља ван употребе, то видно означава на стерилизатору и обавештава главну / одговорну сестру, Техничку службу и координатора Тима за стерилизацију;
- Проверу техничке исправности уређаја вршити у складу са препорукама произвођача односно препорукама техничке службе Дома здравља;

6. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ

- Упутство за безбедни поступак са стерилизаторима