



ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број процедура:	20.07.2018.
Организација:	Процедура
7175/ 227	

ПРОЦЕДУРА СПРОВОЂЕЊА ВЛАЖНЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ

– Дом здравља Горњи Милановац –

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
4.33	20.06.2018	
Израдио Др. Аксентије Тошић <i>Др. Аксентије Тошић</i>	Контролисао	
Тим за заштиту животне средине	<i>Внојзи Милановац</i> Внојзи Милановац спец. педијатрија II 17004365	



1. ПРЕДМЕТ

Овом процедуром утврђује се редослед и поступак извођења влажне стерилизације

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује у објектима Дома здравља Горњи Милановац који поседују аутоклав

3. ДЕФИНИЦИЈЕ

Процедура је писани документ којим се детаљно утврђује начин и поступак извођења влажне стерилизације.

Стерилизација је основни метод асепсекојом се постиже потпуно уништавањесвих врста микроорганизама. То је профилактичка мера којом се спречава уношење инфекције у организам човека.

4. ОДГОВОРНОСТ

За примену процедуре одговорни су начелник и главне сестре служби и лице одговорно за безбедност на раду.

Одговорност за поступак извођења сносе медицинске сестрезапослене на пословима аутоклавирања

5. ОПИС ПОСТУПКА

Пре процеса стерилизације преконтролисати исправност апарата, довод електричне енергије и контролну траку.

Пре укључивања аутоклава припремљене добоше поређати у аутоклав, затворити врата, изабрати жељену температуру и притисак. Добош се у аутоклав ставља отворених страница да би водена пара под притиском могла да доспе до материјала у добошу. Најчешће се користи температура од 123 степена Целзијуса и 132 степена Целзијуса, под притиском од 1,5 – 2,5 атмосфере у трајању од 10 до 30 минута.

Након завршене стерилизације затварају се отвори на добошу да не би дошло до контаминације материјала.

Материјал стерилисан на овај начин стерилан је 72 сата.

Уколико се за ово време материјал не употреби, стерилизација се понавља.

Исправност стерилизације се контролише контролном траком која се поставља на сваки добош.

Након стерилизације материјал се одлаже на адекватан начин и уписује у евиденцију стерилизације са свим параметрима (датум, време, садржај, потпис лица које обавља стерилизацију, контролна трака)

По завршеној стерилизацији поступати по процедурама паковања, издавања и процеса стерилног материјала



Уколико се приликом процеса стерилизације и сушења у аутоклаву уочи било каква неправилност, прекинути процес искључивањем на зелено дугме, не отворати врата и чекати док притисак не падне на дозвољену вредност.

Квар пријавити главној сестри која даље поступа по процедури за пријаве и отклањање кварова.

6. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ

- Упутство за безбедни поступак и рад са аутоклавом
- План и програм обуке за рад у процесу стерилизације
- Образац број 4-115 евиденције извршене стерилизације паром
- Извештај ЗЗЈЗ Чачак о биолошкој контроли стерилизације
- Образац број 4-112 Извештај о изведеној обуци за послове стерилизације