



ДОМ ЗДРАВЉА
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Примаено: 26.01.2018		
Фрг. јед.	Број	Примог
	#175/136	

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЈУ И ОДЛАГАЊЕ БОРЕРА, ФРЕЗА, НОЖИЋА И ДРУГИХ ОШТРИХ ПРЕДМЕТА

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
9.16	28.11.2017.	
Израдио др Горица Јанковић специјалиста ортопедије вилица	Процедуру оверио	
Тим за акредитацију стоматолошке службе	Dr Petro Loto	

1. ЦИЉ

1.1. Зубнотехнички инструменти захтевају посебну пажњу због посебности материјала у њиховој изради.

1.2. Овом процедуром утврђује се поступак деконтаминације, чишћења и одлагања инструмената у зубнотехничкој лабораторији.

2. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ

Процедура је намењена запосленима у Служби за стоматолошку здравствену заштиту - зубнотехничка лабораторија.

3. ДЕФИНИЦИЈА

Процедура се примењује ради заштите запослених од инфекција и правилног чувања инструмената од оштећења.

4. ОДГОВОРНОСТ

Одговорни за контролу ове процедуре су: начелник службе, лекари специјалисти опште стоматологије, изабрани лекари и запослени у зубнотехничкој лабораторији.

5. ПОСТУПАК

5.1. Коришћени инструменти (борери, фрезе) се прикупе и припреме за чишћење.

5.2. Чишћење се врши челичном четком.

5.3. Затим се потапају у дезинфекционо средство. Потом се исперу под млазем текуће воде.

5.4. Затим се суше и одлажу на предвиђено место за чување.

5.5. Зубнотехнички ножић чистимо од остатака воска загревањем над пламеном и брисањем комадом вате.

5.6. Филцеве и четке за полирање испирамо под млазем текуће воде од остатака бимштајна, сушимо и одлажемо до наредне употребе.

5.7. Након чишћења и сушења врши се визуелни преглед чистоће а потом се сви инструменти одлажу на место за чување.

6. ЗАПИСИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

6.1. Упуство произвођача